












Urine		Feces		Diverse materialen					
Urinepotje met geïntegreerd afname-systeem 									
Dysmorfe ery's: Binnen 1 uur na productie het hele potje inleveren bij ziekenhuislocatie Meander MC in Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Nijkerk of Soest									
Klinische Chemie Urinebuizen	Microbiologie Urinebuis <ul style="list-style-type: none"> Bacteriologie Chlamydia (PCR) GO (PCR) Trichomonas (PCR) Virus (PCR) M. genitalium (PCR) 	Klinische Chemie <ul style="list-style-type: none"> Occult bloed 	Microbiologie <ul style="list-style-type: none"> Parasieten (PCR) Bacterieel (PCR) Clostridioides Helicobacter Wormeieren/cysten Virus (PCR) Klinische Chemie <ul style="list-style-type: none"> Calprotectine p-Elastase 	Microbiologie <ul style="list-style-type: none"> Bacterieel Gisten/Candida MRSA BRMO Schimmel (oor) 	Klinische Chemie Fertiliteitsonderzoek <ul style="list-style-type: none"> Semen collectie container LET OP: in steriele verpakking meegeven	Microbiologie <ul style="list-style-type: none"> Chlamydia (PCR) GO (PCR) Trichomonas (PCR) Bacteriele vaginose (PCR) M. genitalium (PCR) 	Microbiologie <ul style="list-style-type: none"> Kinkhoest (PCR) SARS CoV-2 (PCR) Resp. viraal panel (PCR) Atypische respiratoire verwekkers (PCR) 	Microbiologie <ul style="list-style-type: none"> Virus (PCR) Atyp. respiratoire verwekkers (PCR) <small>NB Niet gebruiken voor HPV onderzoek z.o.z.</small>	Microbiologie <ul style="list-style-type: none"> Sputum Haren Nagels Huidschilfers Vloeibare punctaten Pus
 8 ml 4 ml	 4 ml buis								
Buizen via afname systeem vullen Alle buizen inleveren									
24-uurs-urines in bokalen (2L)									
Alle materialen, ook de MRSA /BRMO setjes zijn verkrijgbaar bij de bode									

Pathologisch onderzoek

Weefselonderzoek

- Gebufferde formaldehyde 4%

Cervixuitstrijkje voor HPV

- Thinprep preservecyt solution
- Cervix-brush

10 ml potje



20 ml potje



Cervix-brush



Identificatie

Op aanvraagformulier en materiaal de volgende gegevens vermelden:

- Naam + voorletters
- Geboortedatum
- BSN nummer
- Geslacht
- Afname-datum
- MRSA/BRMO: herkomst materiaal

Bij een zorgdomein aanvraag gaat dat automatisch.

BRMO-screening

Voor het opsporen van dragerschap van MRSA/BRMO verwijzen wij u naar:

[HTTPS://MCCCE.nl/werkafspraken.html](https://mccce.nl/werkafspraken.html): kies Medische Microbiologie BRMO en daarna screenen.

BRMO-setjes zijn verkrijgbaar bij de Bodedienst

of kunnen telefonisch worden aangevraagd op 033-8502103 (afdeling Infectiepreventie)

Transport

Materialen, vergezeld van een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier kunnen:

- Meegestuurd worden met de Bodedienst
- Door de patiënt worden afgegeven op een Meander prikpunt of in het Meander op de Orangerie

Bewaarcondities

Alle materialen dienen bij voorkeur binnen 24 uur te zijn ingeleverd.

Na afname koel bewaren heeft ten alle tijden de voorkeur

Uitzonderingen:

Urine voor Klinisch chemisch onderzoek **moet** binnen 24 uur ontvangen zijn op de afdeling Klinische Chemie.

De **houdbaarheid van de kweekmedia** staat vermeld op de verpakking. Indien de uiterste houdbaarheid datum is bereikt: medium is niet meer te gebruiken.